



KNEO

DIE ORTHESE
ZUR ENTLASTUNG
DES KNIES

BESSER IN BEWEGUNG

NEU KNEO – DURCHDACHTE DETAILS FÜR OPTIMALE PASSFORM UND WIRKUNG


DAS INTIMATE FIT-PRINZIP

LIVING HINGE

Permanente anatomische Anpassung der Orthese an die unterschiedlichen Längen des Beins während der Bewegung

INDIVIDUELL ANFORMBAR

Die anatomisch vorgeformte Seitenschiene lässt sich optimal an die Kontur des Unterschenkels anpassen

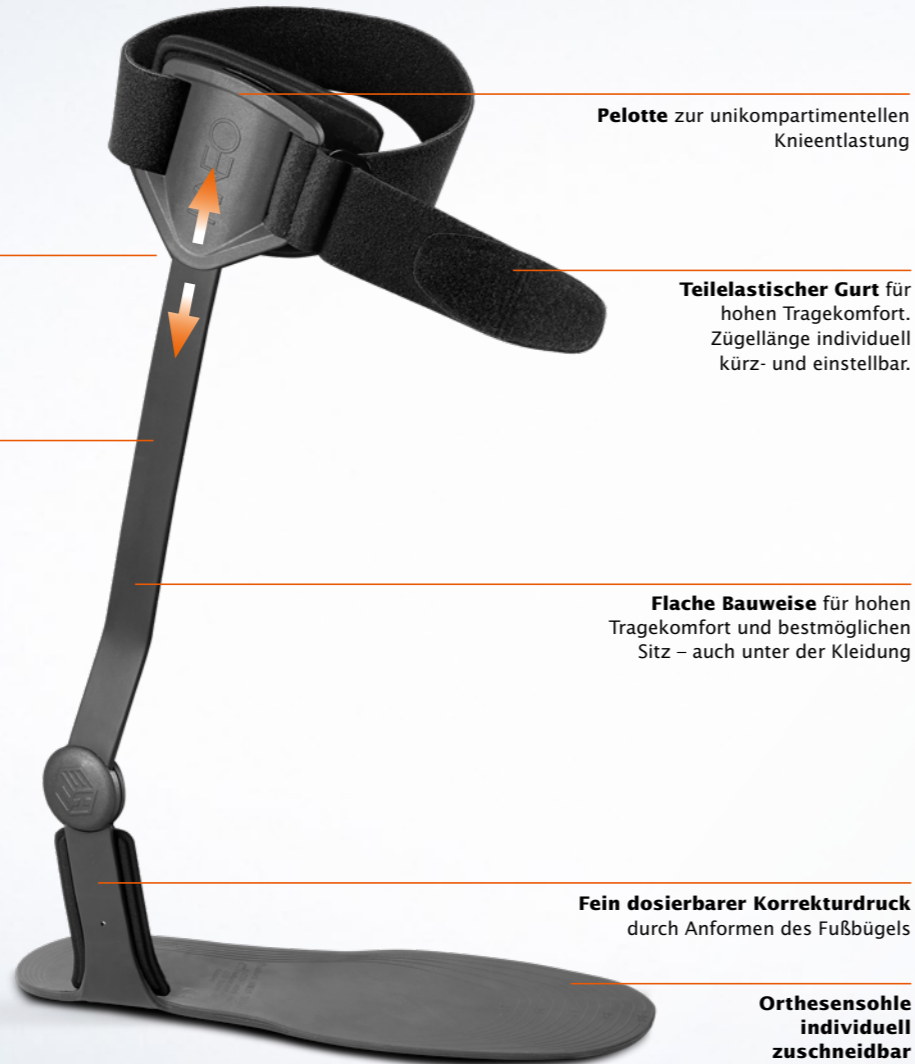

NEU KNEO – DYNAMISCHE ORTHESE ZUR ENTLASTUNG DES KNIES

Die neuentwickelte SPORLASTIC Knieentlastungsorthese KNEO wird an Fuß und Unterschenkel befestigt, wirkt allerdings auf das Knie. Sie kann zur unikompartimentellen Entlastung eingesetzt werden, wie z.B. bei medialer Gonarthrose.

Beim Auftreten auf die Fußsohle wird eine Korrekturkraft erzeugt, welche über die seitliche Schiene übertragen wird und auf die Pelotte wirkt. Je nach Ausführung wird damit die Bodenreaktionskraft und somit die durch das Knie verlaufende Lastlinie in medialer oder lateraler Richtung verschoben. Eine Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments ist die Folge.

Dank des INTIMATE FIT-PRINZIPS ist diese orthetische Revolution zudem kaum spürbar. Durch ihre innovative Bauweise lässt sich die KNEO an die anatomische Kontur des Patienten anpassen und trägt unter der Kleidung nicht auf. Das Living Hinge ermöglicht der Pelotte, den Bewegungen des Beins zu folgen, um somit stets richtig und bequem zu sitzen. Ein Verrutschen der Orthese wird dadurch ebenfalls verhindert.

INDIKATIONEN

Alle Indikationen und Beschwerden, bei denen eine unikompartimentelle Entlastung indiziert ist, z. B. Gonarthrose

Position-Nr. 23.04.04.0xxx

Artikel-Nr. 07790
Mediale Ausführung

Artikel-Nr. 07791
Laterale Ausführung

Farbe: schwarz

Bitte R oder L angeben

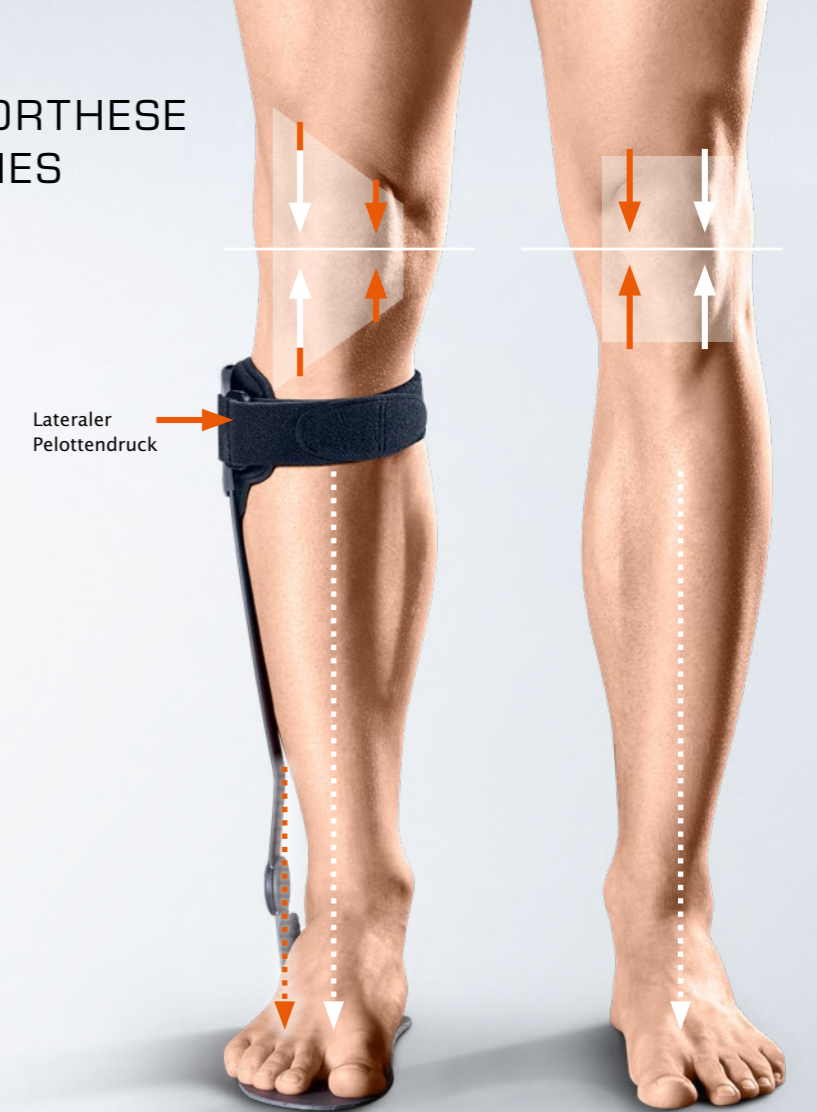


Abbildung einer medialen Orthesenausführung

↓ Verschiebung der durch das Knie verlaufenden Lastlinie mit KNEO

↓ Physiologische durch das Knie verlaufende Lastlinie, ohne KNEO

SPORLASTIC ORTHOPAEDICS – BESSER IN BEWEGUNG



SO MESSEN SIE RICHTIG

Für die Bestimmung der Orthesengröße werden zwei Maße genommen:

- A** Die äußere Knöchelhöhe vom Boden bis zur Mitte des Knöchels
- B** Die Höhe vom Boden bis zum Fibulaköpfchen

STANDARDGRÖSSEN

Größe	Höhe Knöchelgelenk	Höhe Fibulaköpfchen
1	6,5 – 7,5 cm	35 – 38 cm
2	6,5 – 7,5 cm	38,5 – 41,5 cm
3	6,5 – 7,5 cm	42 – 45 cm
4	7,5 – 8,5 cm	39,5 – 42,5 cm
5	7,5 – 8,5 cm	43 – 46 cm
6	8,5 – 9,5 cm	44 – 47 cm

Falls keine Standardgröße in Frage kommt, kann die Orthese auch als Sondergröße angefertigt werden. Bitte fordern Sie hierzu das KNEO Maß- und Bestellblatt an.

_ SPORLASTIC DEUTSCHLAND

SPORLASTIC GmbH
Medizinische Produkte
Weberstraße 1 _ 72622 Nürtingen
Germany
Postfach 14 48 _ 72604 Nürtingen
Germany

Telefon +49 70 22/70 51 81
Fax +49 70 22/70 51 13
info@sporlastic.de
www.sporlastic.de

_ SPORLASTIC SCHWEIZ

BERRO AG
Austrasse 7 _ 9055 Bühler
Switzerland

Telefon +41 71/335 07 77
Fax +41 71/335 07 70
info@sporlastic.ch
www.sporlastic.ch

_ SPORLASTIC ÖSTERREICH

Wir sind unter der
deutschen Adresse für Sie da.

_ SPORLASTIC QUALITÄT



Qualitätsmanagementsystem
DQS-zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485:2012,
Reg.-Nr. 069305 MP2012



**MITTELSTAND
GLOBAL**
HEALTH MADE
IN GERMANY

_ SPORLASTIC DIGITAL



Die SPORLASTIC App für
Ihr Smartphone und Tablet



Find us on
facebook.

www.facebook.com/sporlastic



YouTube

www.youtube.com/sporlastic



Instagram

www.instagram.com/sporlastic_official