



MALLEODYN S3
ABRÜSTBARE SPRUNGGELLENKORTHESE
ZUR DYNAMISCHEN MOBILISIERUNG

BESSER IN BEWEGUNG

SPORLASTIC GANZHEITLICHES BEHANDLUNGSKONZEPT RUNDUM VERSORGT

Besonders das Sprunggelenk ist hohen Belastungen ausgesetzt. Daher kann es vor allem beim Sport, aber auch im Alltag zu akuten Verletzungen und chronischen Überlastungsreaktionen im Bereich von Bändern, Sehnen, Knochen und Gelenkknorpeln kommen. Orthesen können hierbei einen frühfunktionellen und phasengerechten Heilungsverlauf unterstützen.

BANDAGEN UND ORTHESEN HELFEN

Laut einer repräsentativen **Allensbach-Patientenbefragung**¹ zur Wirksamkeit von orthopädischen Hilfsmitteln konnten **66 %** der Träger von Bandagen/Orthesen, die früher regelmäßig Präparate gegen die Schmerzen einnehmen mussten, infolge der Hilfsmittelnutzung ganz oder teilweise **auf Schmerzmittel verzichten**. **23 %** der Patienten konnten dank Bandage/Orthese auf eine Operation verzichten.¹

Mit der **MALLEODYN S3** bietet SPORLASTIC eine abrüstbare Sprunggelenkorthese mit verschiedenen Stabilisierungsgraden, die eine frühfunktionelle und phasengerechte Genesung unterstützt.

Quellenangaben:

1) Repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag von Eurocom e.V. 2014: „Nutzung und Wirksamkeit orthopädischer Hilfsmittel“





Funktionelle Hilfsmittel



Spezielle Übungsprogramme



Hilfreiche, erprobte Trainingsgeräte

INKLUSIVE PHYSIOTHERAPIE ZUM MITNEHMEN DIREKTER VORTEIL FÜR IHRE PATIENTEN

SPORLASTIC Sprunggelenkorthesen unterstützen in Kombination mit medizinischen und physiotherapeutischen Maßnahmen ein ganzheitliches Behandlungskonzept, das die ursächlichen Aspekte der zugrunde liegenden Indikationen einbezieht.

Bieten Sie Ihren Patienten einen echten Zusatznutzen:

Ein QR-Code in jeder Produktverpackung führt Patienten mit dem Smartphone oder Tablet zu wichtigen Produktinformationen sowie angeleiteten Therapieübungen zur Unterstützung einer schnelleren Genesung. Nutzen Sie darüber hinaus auch unsere Patientenbroschüre mit weiteren interessanten Inhalten.

Und das Beste ist, dass Ihre Patienten immer und überall Zugriff auf diese wichtigen Informationen und Übungen haben und diese selbstständig durchführen können.



MALLEODYN S3

ABRÜSTBARE SPRUNGGELENKORTHESE ZUR DYNAMISCHEN MOBILISIERUNG

Die innovative Sprunggelenkorthese lässt sich einfach analog dem Therapieverlauf in 3 Schritten abrüsten. In der Akutphase stabilisiert, entlastet und kühlt sie das Sprunggelenk gemäß der PECH-Regel (Pause, Eis, Compression, Hochlagern). Durch die flexible innen-schuhartige Konstruktion und die einfache Handhabung kann die **MALLEODYN S3** nach den 3 Abrüstungs-Schritten zur Sekundär-Prävention eingesetzt werden.

INDIKATIONEN

- Konservativ/postoperativ
 - Alle Indikationen, bei denen eine Stabilisierung bzw. Bewegungseinschränkung des Sprunggelenks mit nachfolgender funktioneller Mobilisierung der verletzten oder geschädigten Strukturen notwendig ist
 - Akute Sprunggelenkverletzungen
 - Akute Kapselbandinstabilitäten und Rupturen
 - Einschränkung von Talusvorschub und -kipfung
 - Chronische Kapselbandinstabilitäten
 - Supinationstraumen
 - Sprunggelenkdistorsionen
 - Prävention bei Bandinstabilitäten
-
- Positions-Nr. 23.02.04.0011
 - Artikel-Nr. 07841
 - Farbe:
 - Bitte R oder L angeben



VOLL AUFGERÜSTET

In der Akutphase – Kühlpad inklusive

Voll aufgerüstet kann die Orthese optimal gemäß der PECH-Regel eingesetzt werden. Das beiliegende Kühlpad, kombiniert mit seitlich stabilisierender Schiene und 8er-Zügel, entlastet und stabilisiert das Sprunggelenk in der Akutphase. Nach einer einmaligen, individuellen Grundeinstellung erfolgt das Anlegen der Orthese in Neutralstellung über den offenen ventralen Einstieg stets mit nur zwei Klicks.

IN 3 SCHRITTEN ABRÜSTBAR

1



1. ABRÜSTUNGSSCHRITT

Nach Abrüstung des Kühlpads

Nach der Akutphase erfolgt die Stabilisierung durch anatomisch geformte Schienen inklusive der zusätzlich versteifenden, seitlichen Schiene (orange) in Pro- und Supinationsrichtung. Die Einschränkung des Talusvorschubs und der Plantarflexion erfolgt durch den unter dem Mittelfuß positionierten 8er-Zügel.

2



2. ABRÜSTUNGSSCHRITT

Nach Abrüstung der Seitenschiene

Die Orthese passt sich durch das bi-elastische Material optimal an die Anatomie des Sprunggelenks an und lässt einen weiteren Schritt der Mobilisierung in Pro- und Supinationsrichtung zu. Weiterhin stabilisieren anatomisch geformte, aufgenähte Schienen mit tiefer Fassung der Ferse sowie der 8er-Zügel das Sprunggelenk.

3



3. ABRÜSTUNGSSCHRITT

Nach Abrüstung des 8er-Zügels

Nach der Abrüstung des 8er-Zügels lässt die Orthese maximale Mobilisierung für das Sprunggelenk dem Therapieverlauf entsprechend zu. Das schnelle und intuitive Anlegen der Orthese erfolgt nach wie vor mit nur zwei Klicks.



VOLL ABGERÜSTET

Lange Tragezeit und zur Sekundär-Prävention

Die hochwertigen Materialien mit antibakterieller Wirkung machen die innovative Orthese zu einem unterstützenden Hilfsmittel beim Sport oder für einen bewegten Alltag. Die abgerüstete Orthese kann Sicherheit und Stabilisierung in der Akutphase wie auch dynamische Führung zur Prävention bieten.

Maximale Atmungsaktivität

Anatomisch geformte
Seitenschiene – einfach
abrüstbar mit einem **Klick**



Beinverschluss – schnelles
Anlegen mit einem **Klick**

Abrüstbarer
8er-Zügel

Bi-elastisches Innenpolster
für druckfreie Knöchel

Antibakterielle Wirkung
des Innenpolsters
mit Carbon Finish



Fußverschluss – einfaches
Verschließen mit einem **Klick**



Beiliegendes **Kühlpad** für
therapiegerechte Lagerung

Physiotherapie zum Mitnehmen
per QR-Code auf beiliegender Karte



SPORLASTIC ORTHOPAEDICS – BESSER IN BEWEGUNG

GRÖSSE

MALLEODYN S3

Schuhgröße

1	35	–	40
2	41	–	47



SPORLASTIC DEUTSCHLAND

SPORLASTIC GmbH
Medizinische Produkte

Weberstraße 1 • 72622 Nürtingen
Germany
Postfach 14 48 • 72604 Nürtingen
Germany

Telefon +49 7022 705181
Fax +49 7022 705113
info@sporlastic.de
www.sporlastic.de

SPORLASTIC SCHWEIZ

BERRO AG
Austraße 7 • 9055 Bühler
Switzerland

Telefon +41 71 3350777
Fax +41 71 3350770
info@sporlastic.ch
www.sporlastic.ch

SPORLASTIC ÖSTERREICH

Wir sind unter der
deutschen Adresse für Sie da.

SPORLASTIC QUALITÄT



Qualitätsmanagementsystem
DQS-zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485:2016,
Reg.-Nr. 069305 MP2016



**MITTELSTAND
GLOBAL**
HEALTH MADE
IN GERMANY

SPORLASTIC DIGITAL



www.facebook.com/sporlastic



www.youtube.com/sporlastic



www.instagram.com/sporlastic_official

 **SPORLASTIC**[®]
ORTHOPAEDICS

